

MASQUE BARRIÈRE

Homologation AFNOR SPEC S76-001:2020

Cat. 1 : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. Filtre >90% des particules >3µm

COVID-19
le monde rural
S'ENGAGE

NOTICE D'UTILISATION ET DE NETTOYAGE



Albatros
FRANCE



La fabrication de ces masques est le fruit d'une **coopération** aboutie entre la **société Albatros France** (Port-Sainte-Marie) et l'**Association des Maires Ruraux 47**.

CONSIGNES de NETTOYAGE

Avant toute première utilisation, il est recommandé de laver le masque au moins un fois suivant les consignes de nettoyage décrites ci-dessous:



1. Laver en machine

- avec une lessive classique
- cycle >30min
- température de lavage >60°



2. Repasser au fer

- température de repassage >120°

CONSIGNES d'UTILISATION

Rappel: Le masque barrière n'exonère pas les personnes de maintenir l'ensemble des gestes barrières recommandés



1. Lavez-vous les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique en insistant bien entre les doigts

2. Prenez le masque par les 2 élastiques et appliquez-le sur votre visage en plaçant les élastiques derrière les oreilles

3. Ajustez si besoin le masque en haut en en bas pour maximiser la zone de protection

4. Évitez de toucher le masque. Si c'est inévitable, lavez-vous les mains avant et après contact

5. Changez de masque toutes les 4h et lavez les masques souillés selon les consignes données



Informations générales

Composition des masques: Tous les tissus utilisés sont de fabrication française. **Tissu intérieur et extérieur du masque:** 100% coton 150g/m² blanc optique. **Tissu central:** 100% polyester 140 g/m².

Précautions d'emploi: Ce qu'il faut éviter avec votre masque barrière: il ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits chimiques, il ne peut pas être congelé. L'agent viral est conservé et à 4°C il ne perd pas son caractère infectieux. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque barrière.

Pour retirer le masque barrière, lavez vous les mains. Saisissez par l'arrière les élastiques sans toucher la partie avant du masque barrière. Placez le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre). Lavez vous les mains.

Règlementation: Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Ces masques sont exclusivement réservés à des usages non sanitaires et ne doivent en aucun cas être utilisés pour prodiguer des soins. Ils ne peuvent pas non plus remplacer les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoire dans l'entreprise.

Par ailleurs, il est rappelé que l'emploi des masques dans le milieu professionnel doit s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre par l'employeur des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs (articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail)

De la même façon, l'employeur doit s'assurer que la respirabilité effective du masque est compatible avec les particularités du poste de travail et en particulier l'effort fourni (R4323-91 du Code du Travail)

Homologation: Albatros France fabrique des masques barrières 3 plis, ils sont homologués par la DGA (Direction générale de l'armement) et IFTH (Institut Français du Textile-Habillement) testés 20 lavages. La société Albatros France ne peut être tenue responsable de tous dommages liés au port du masque.

Rappel des Gestes Barrières

Rappel: Les gestes barrières sont les seuls remparts pour contenir l'épidémie, il convient de continuer à les respecter au quotidien



Se laver les mains régulièrement



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir




Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter



Saluer sans se serrer la main. Éviter les embrassades

RESPECTER LES CONSIGNES DE DISTANCIATION SOCIALE:

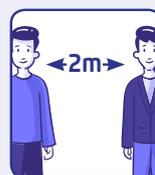

Éviter tout rassemblement non-essentiel ou de fréquenter des endroits publics. Limiter tout contact avec les personnes à risque (les personnes âgées et les personnes vulnérables). Garder une distance de 2 mètres avec les autres (cette distance correspond à deux longueurs de bras).

Pour toutes questions relatives au COVID-19:



GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



0 800 130 000
appel gratuit